

# Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ per la terapia 3M™ Veraflo™ Therapy

Una soluzione semplice per ferite complesse.




- ▶ La medicazione V.A.C. Veraflo Cleanse Choice Dressing, abbinata alla terapia Veraflo, può essere usata per iniziare la terapia e per facilitare la rimozione dei materiali infetti.
- ▶ Può essere presa in considerazione quando lo sbrigliamento chirurgico non è possibile o adatto, e su indicazione clinica.<sup>1</sup>

# Come funziona la medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ con la terapia 3M™ V.A.C. Veraflo™?

- ▶ La medicazione include 3 strati diversi: uno strato di contatto con una trama a fori più larghi e 2 strati di copertura per permettere l'applicazione a ferite di profondità variabile
- ▶ Unisce il movimento 'meccanico' alla superficie della ferita in combinazione con la somministrazione ciclica e il mantenimento in situ delle soluzioni topiche<sup>2</sup>
- ▶ Lo strato di contatto, in combinazione con lo strato di copertura, cattura le particelle più grandi per aiutare a prevenire gli allarmi dovuti a ostruzioni
- ▶ Lo strato di contatto e lo strato sottile di copertura forniscono una migliore conformabilità

La medicazione V.A.C. Veraflo Cleanse Choice è stata progettata per aiutare a rimuovere più facilmente il materiale infetto, come l'essudato fibrinoso denso, l'escara e le altre cariche microbiologiche della ferita fino a 30 centipoise (cP).<sup>3</sup>

## Viscosità di fluidi comuni

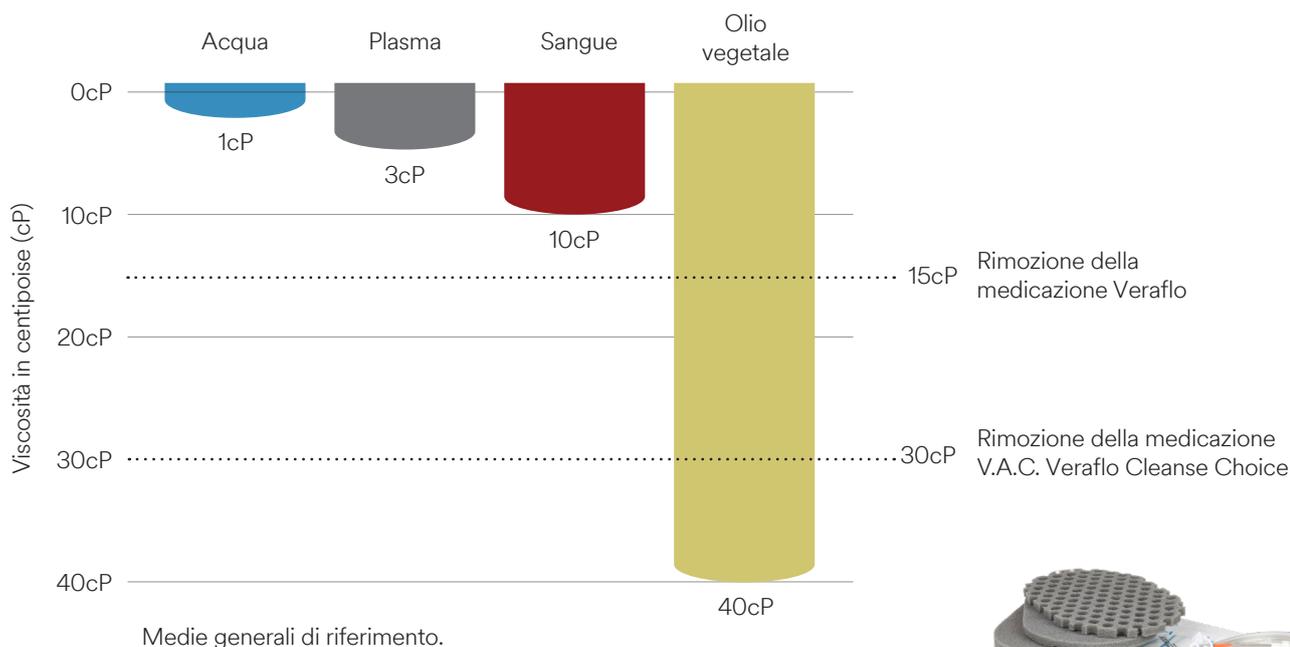

# Quando usare la terapia 3M™ Veraflo™.

Usata insieme a una buona pratica clinica, la terapia Veraflo può essere usata per le ferite difficili (non-healing), come:

- ▶ Ferite contaminate
- ▶ Ferite diabetiche
- ▶ Ferite infette acute e croniche
- ▶ Ferite traumatiche
- ▶ Ulcere da decubito
- ▶ Ferite infette in presenza di presidi ortopedici (fissatori, chiodi) o impianti articolari

## Scegliere la terapia Veraflo è facile come:

- 1 Scegli la tua medicazione Veraflo (vedi retro)
- 2 Scegli le tue impostazioni (tempo di mantenimento in situ e frequenza del ciclo)
- 3 Scegli la tua soluzione\*

### Raccomandazioni del comitato medico basate sulle evidenze pubblicate e sull'esperienza dei medici:<sup>4</sup>



Tempo di mantenimento in situ  
10-20 minuti



Frequenza del ciclo  
2-4 ore a -125mmHg  
(fino a 6 ore per le ferite più estese)



Soluzione salina  
(nella maggior parte dei casi)

L'NPWTi-d è un'aggiunta agli altri principi standard per la valutazione e il trattamento appropriati delle ferite.

### Informazioni per gli ordini:

SKU:  
ULTVCC05MD

Descrizione:  
Medicazione 3M™ V.A.C.  
Veraflo Cleanse Choice™

Dimensione:  
Media

Quantità:  
confezione da 5

\*Si ponga in contatto con il Suo rappresentante locale di 3M per la lista delle soluzioni topiche compatibili con le medicazioni 3M e relativi componenti.

Per favore, controllare e seguire le istruzioni per l'uso delle soluzioni topiche con V.A.C. Veraflo come da indicazioni del produttore.



	Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo™	Medicazione Grande 3M™ V.A.C. Veraflo™	Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse™	Medicazione 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™
<b>Caratteristiche della ferita</b>	Ferite aperte, incluse le ferite con erosione superficiale o tunnellizzazioni con estremità distali visibili	Ferite aperte estese, incluse le ferite con erosione superficiale o tunnellizzazioni con estremità distali visibili	Ferite cavarie con margini irregolari	Ferite con essudato fibrinoso denso, escara, materiale infetto e altre cariche microbiologiche
<b>Obiettivo(i) chiave della terapia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quando è usata insieme alla terapia Veraflo aiuta a rimuovere più facilmente il materiale infetto e le altre cariche microbiologiche della ferita</li> <li>▶ Crescita di un tessuto di granulazione robusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quando è usata insieme alla terapia Veraflo aiuta a rimuovere più facilmente il materiale infetto e le altre cariche microbiologiche della ferita</li> <li>▶ Crescita di un tessuto di granulazione robusto nelle ferite estese</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quando è usata insieme alla terapia Veraflo inizia la terapia attiva e aiuta a rimuovere più facilmente il materiale infetto e le altre cariche microbiologiche della ferita</li> <li>▶ Facile applicazione in ferite con tunnellizzazioni ed erosioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Quando è usata insieme alla terapia Veraflo inizia la terapia attiva e aiuta a rimuovere più facilmente il materiale infetto, come l'essudato fibrinoso denso, l'escara e le altre cariche microbiologiche della ferita</li> <li>▶ Può essere presa in considerazione quando lo sbrigliamento chirurgico non è possibile o adatto, e su indicazione clinica.¹</li> </ul>
<b>Forma</b>	Schiuma pretagliata, a spirale	Blocco di schiuma pretagliata in due strati	Forma tubolare	Blocco di schiuma pretagliata in tre strati
<b>Caratteristiche di applicazione</b>	<p>Facile applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dimensionabile senza l'uso di forbici</li> <li>▶ Area pretagliata per l'applicazione 'a ponte'</li> <li>▶ Applicazione di un singolo pad</li> </ul>	<p>Facile applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ideale per superfici estese con profondità scarse</li> <li>▶ Fornita con set tubi 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™ per la copertura di una superficie estesa</li> </ul>	<p>Flessibilità di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ideale per rispondere alle ferite con margini irregolari, erosioni e applicazioni su lesioni circolari</li> <li>▶ Applicazione di un singolo pad</li> </ul>	<p>Applicazione facile e flessibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strati sottili per una migliore conformabilità</li> <li>▶ Gli strati multipli forniscono diverse opzioni di applicazione per le ferite a profondità variabili</li> <li>▶ Ideale per ferite contaminate che richiedono una terapia attiva</li> <li>▶ Applicazione di un singolo pad</li> </ul>
<b>Caratteristiche delle medic</b>	<p>Piccola: 7,7 × 11,2 × 1,75cm per pezzo (spirale in 2 pezzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ciascun pezzo 24cm srotolato</li> <li>▶ Ciascun pezzo 18cm lungo a ponte</li> </ul> <p>Intervallo di fill-assist prefissato: 12-80ml (1 pezzo); 26-160ml (2 pezzi)</p> <p>Media: 14,7 × 17,4 × 1,75cm per pezzo (spirale in 2 pezzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ciascun pezzo 80cm srotolato</li> <li>▶ Ciascun pezzo 74cm lungo a ponte</li> </ul> <p>Intervallo di fill-assist prefissato: 38-240ml (1 pezzo); 80-450ml (2 pezzi)</p>	<p>25,0 × 15,0 × 1,6cm per pezzo (ovale - 2 pezzi)</p> <p>Intervallo di fill-assist prefissato: 55-350ml (1 pezzo); 110-500ml (2 pezzi)</p>	<p>1 medicazione tubolare arrotondata 24" (~ 61cm); diametro 1,25" (~ 3cm)</p> <p>Intervallo di fill-assist prefissato: 65-130ml (1/2 medicazione); 130-250ml (medicazione intera)</p>	<p>18,0cm × 12,5cm spessori variabili (0,8cm - 3,2cm)</p> <p>3 strati</p> <p>Strato di copertura di 1,6cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intervallo di fill-assist prefissato: 85-160ml</li> </ul> <p>Strato di copertura di 0,8cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intervallo di fill-assist prefissato: 42-80ml</li> </ul> <p>Strato di contatto di 0,8cm (fori circolari da 1,0cm; spaziatura di 0,5cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intervallo di fill-assist prefissato: 24-46ml</li> </ul>



Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante locale.

**3M Italia srl**  
 Medical Solutions Division  
 Via Norberto Bobbio, 21  
 20096 Pioltello (MI)  
 0039 02 70 351  
 www.3Mitalia.it

**Bibliografia**

1. Teot L, Boissiere F, Fluiéaru S. Novel foam dressing using negative pressure wound therapy with instillation to remove thick exudate. *Int Wound J.* 2017; doi: 10.1111/iwj.1217.
2. 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing Disruption of Simulated Tissue Test. DOC-0000039656. June 2015
3. 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Thick Exudate Fluid Removal & Pressure Maintenance Test Report. DOC-0000039947. June 2015.
4. Kim PJ, et al. Negative Pressure Wound Therapy With Instillation: Review of Evidence and Recommendations. *Wounds.* 2015 Dec;27(12):S2-S19.

**Nota: Per i prodotti e le terapie KCI esistono indicazioni specifiche, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni sulla sicurezza. Consultare un medico e le istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'applicazione. Questo materiale è destinato a professionisti sanitari.**



© 2021 3M. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi commerciali indicati nel presente sono di proprietà di KCI Licensing, Inc., sue affiliate e/o concessionari. PRA-PM-IT-00073 (06/21). OMG157928.